



**ISTRUZIONI PER L'USO**

Questo foglietto informativo ha lo scopo di informare gli utenti della gamma di lenti a contatto morbide idrofiliche trasparenti ed evidenziate Polymacon su come indossare e avere cura delle proprie lenti.

Questo è applicabile a:

NOME PRODOTTO	MATERIALE	CONTENUTO D'ACQUA	TIPO DI CONFEZIONE
Lenti a contatto evidenziate SofLens® 38 (polymacon)	Polymacon	38,6% in peso	Soluzione salina tamponata con fosfato
Lenti a contatto evidenziate SofLens® Multi-Focal (polymacon)			
Lenti a contatto evidenziate Optima® FW (polymacon)	Polymacon	38,6% in peso	Soluzione salina tamponata con fosfato in blister Soluzione salina sterile in contenitore
Lenti a contatto evidenziate Optima® 38 (polymacon)	Polymacon	38,6% in peso	Soluzione salina sterile
Lenti a contatto serie SofLens® (polymacon) – B3, H3, H4, H03 e H04			

**Descrizione e applicazione**

Le lenti Optima® FW, serie SofLens® e SofLens® Multi-Focal sono ideate per un utilizzo giornaliero, con il periodo di sostituzione prescritto dal Contattologo.

Le lenti SofLens® 38 e Optima® FW sono ideate per un utilizzo giornaliero o esteso a 1-7 giorni fra due sostituzioni successive, in base alla raccomandazione del Contattologo.

Ogni volta che vengono rimosse, le lenti devono essere pulite, lavate e disinfettate prima di essere reindossate. Attenersi sempre alla frequenza di utilizzo e di sostituzione raccomandata dal Contattologo.

**STERILE** Le lenti sono fornite sterili e sono indicate per il riutilizzo da parte del produttore in conformità a quanto prescritto dal proprio ottico di fiducia. Le lenti sono sterilizzate a vapore.

NON UTILIZZARE se la confezione è aperta o danneggiata.

**Istruzioni per l'inserimento e la rimozione**

Prima di toccare le lenti, lavare e asciugare sempre accuratamente le mani, evitando di utilizzare saponi profumati e trattanti. Porre la lente nel palmo della mano. Accertarsi che la lente sia nella posizione corretta.



Ispezionare la lente prima di inserirla e non inserirla nel caso in cui sia graffiata o danneggiata.

Per rimuovere la lente, verificare di avere le mani pulite e asciutte, utilizzare un dito per far scorrere la lente in basso fino alla parte bianca dell'occhio e poi rimuoverla. Utilizzare gocce umidificanti nel caso in cui la lente sia difficile da rimuovere.

**Cura delle lenti**

- Pulire e disinfettare le lenti dopo ogni utilizzo è essenziale per la buona salute degli occhi
- Usare esclusivamente prodotti per la cura di lenti a contatto morbide e seguire le istruzioni del produttore
- Usare sempre soluzioni per la cura delle lenti fresche e non scadute
- Non utilizzare altre soluzioni, quali acqua del rubinetto o in bottiglia, o saliva, per lavare, conservare o riuniformare le lenti
- Quando non vengono indossate, conservare sempre le lenti immerse nella soluzione raccomandata
- Ogni volta che si puliscono le lenti, ricordarsi di pulire anche la relativa custodia
- Eliminare sempre le lenti al termine del periodo di utilizzo prescritto dal Contattologo
- Prima di toccare le lenti, lavarsi sempre le mani
- Impedire che cosmetici, lozioni, detergenti, creme o sostanze profumate entrino in contatto con gli occhi e con le lenti
- Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati oppure le unghie per rimuovere le lenti dai contenitori o dagli occhi

**Avvertenze e precauzioni**

Il mancato rispetto della frequenza di utilizzo e del regime di pulizia raccomandati dal Contattologo può aumentare notevolmente il rischio di gravi infezioni oculari.

Se prescritte per l'uso giornaliero, non indossare durante il sonno.

Non indossare le lenti a contatto nel caso in cui si soffre di:

- Allergie, infiammazioni, infezioni o rossore dell'occhio o intorno all'occhio
- Secchezza degli occhi (liquido lacrimale non adeguato)
- Patologie che abbiano influenza sugli occhi, ad es. raffreddori e influenze
- Malattie sistemiche che abbiano effetti sugli occhi

Contattare il Contattologo prima di indossare le lenti:

- Per praticare sport acquatici
- In ambienti eccessivamente secchi o polverosi
- Quando si utilizzano farmaci per gli occhi

Non caso in cui si verifichi una qualunque delle seguenti condizioni, rimuovere le lenti **immediatamente**:

- Dolore puntorio, bruciore, prurito, irritazione o altri dolori localizzati all'occhio
- Comfort ridotto rispetto alle volte precedenti in cui sono state indossate le lenti
- Secrezioni insolite o lacrimazione eccessiva dell'occhio
- Rossore degli occhi
- Secchezza degli occhi grave o persistente
- Riduzione o sfocamento della vista
- Arcobaleni o aloni intorno alle luci
- Sensibilità alla luce

Se uno qualunque di tali sintomi persiste dopo la rimozione, la pulizia e il nuovo inserimento delle lenti oppure dopo l'inserimento di lenti nuove, rimuovere le lenti e **contattare il Contattologo**. Se ignorati, tali sintomi possono essere causa di disturbi più gravi.

**Guida di riferimento per simboli, etichette e confezioni**



Imposta pagata per lo smaltimento rifiuti in linea con la direttiva 94/62/CE



Bausch & Lomb Incorporated  
1400 North Goodman Street  
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road  
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Data di emissione: AAAA-MM-GG



Indica il contrassegno di conformità CE e il numero dell'ente di notifica

\*//<sup>m</sup> sono marchi di fabbrica di Bausch & Lomb Incorporated o delle sue affiliate.

© Bausch & Lomb Incorporated.

8113400