

I - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI RIPORTATE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE PER RIFERIMENTI FUTURI.

Bausch+Lomb Biotrue® soluzione unica

Umecta, pulisce, disinfetta, riscalda e conserva le lenti, elimina le proteine. **Istruzioni:** Per un'attenta pulizia, disinfettare le lenti ed eliminare le proteine, seguire questi semplici passaggi. Bausch + Lomb raccomanda questo regime quotidiano per un uso salutare e confortevole delle lenti a contatto.

PUNTO 1: Mettere almeno 2 gocce della soluzione unica Biotrue® su ogni lato della lente e strofinare con delicatezza per 20 secondi.

PUNTO 2: Sciagquare accuratamente entrambi i lati della lente per 5 secondi con soluzione unica Biotrue®.

PUNTO 3: Riporre le lenti a contatto pulite nell'apposito portalenti e riempirlo con soluzione unica Biotrue® fresca, appena prelevata dal flacone. Lasciare in immersione per almeno 4 ore. Ricordarsi di utilizzare sempre soluzione fresca - gettare la soluzione dal portalenti dopo ogni uso.

Le tue lenti sono ora pronte per l'uso. In caso di presenza di residui sulle lenti, risciacquare con soluzione unica Biotrue® prima di applicarle. Seguire sempre le istruzioni del Contattologo. Sulla base della composizione chimica del vostro liquido lacrimale e delle ore d'uso delle lenti, il Contattologo può raccomandare ulteriori prodotti o procedure. Se non desiderate mettere subito le lenti, lasciatele immerse nel portalenti chiuso. Non conservare le lenti in una semplice soluzione salina al posto di soluzione unica Biotrue®. La soluzione salina non ha proprietà disinfettanti. Potete conservare le lenti nel portalenti ben chiuso fino al momento di riutilizzarle fino ad un massimo di 30 giorni. Se le conservate per periodi più lunghi, è necessario pulirle e disinfettarle con soluzione unica Biotrue® prima di riapplicarle.

Contenuto: Soluzione isotonica sterile contenente hyaluronan, sulfobetaina, polossamina, acido borico, sodio borato, disodio edotato, cloruro di sodio; preservata con un doppio sistema disinfettante (polidaminopropilguanide 0,0003% e poliquaternium 0,0003%).

Azioni: Su uso quotidiano, la soluzione unica Biotrue® distacca le proteine e pulisce, scioglie e rimuove gli accumuli di film lacrimale, residui e depositi dalle lenti a contatto morbide. La soluzione unica Biotrue® combatte la formazione di depositi irritanti sulla superficie delle lenti. Elimina i microrganismi nocivi presenti sulle lenti. Mentre le lenti sono immerse nella soluzione, la formulazione le avvolge con uno strato ricco di acqua che le fa rimanere confortevoli per tutto il giorno. La soluzione unica Biotrue® può essere utilizzata anche per sciagquare le lenti.

Vantaggi di Biotrue®: Si comporta come i tuoi occhi. La soluzione unica Biotrue® contiene un lubrificante presente nell'occhio umano, ed ha un pH bilanciato uguale a quello delle lacrime naturali. La soluzione unica Biotrue® crea un effetto simile a un cuscinetto d'acqua ed idrata le lenti per un uso confortevole. La soluzione unica Biotrue® aiuta a prevenire la densificazione di alcune proteine lacrimali; questo garantisce la pulizia delle lenti e inibisce la formazione di depositi che possono provocare discomfort ed abbreviare i tempi d'uso delle lenti. Mantenimento le lenti idratate e pulite la soluzione unica Biotrue® ne garantisce un uso confortevole per tutto il giorno. Biotrue®: una soluzione che si comporta come i tuoi occhi.

Indicazioni: La soluzione unica Biotrue® è indicata per l'uso nella reidratazione quotidiana, nella pulizia, nel risciacquo, nell'eliminazione dei depositi proteici, nella disinfezione chimica (non a caldo) e nella conservazione delle lenti a contatto morbide (idriche), incluse quelle in silicone hydrogel, come raccomandato dal Contattologo.

Controindicazioni: Non utilizzare in caso di allergia a uno dei prodotti sopra menzionati.

AVVERTENZE: PROBLEMI CON LE LENTI A CONTATTO E CON I PRODOTTI DI MANUTENZIONE POTREBBERO CAUSARE INFEZIONI CORNEALI E/O ULCERE, E PORTARE A PERDITA DELLA VISTA. È essenziale seguire i consigli del Contattologo e tutte le indicazioni riportate nelle etichette per il corretto uso delle lenti e dei prodotti per la loro cura, portalenti compreso. I problemi oculari, ulcere corneali comprese, possono svilupparsi rapidamente e portare alla perdita della vista. Le lenti per uso giornaliero non sono indicate per l'uso notturno e non devono essere portate durante il sonno. Studi clinici hanno dimostrato che portare questo tipo di lenti anche la notte accresce il rischio di serie reazioni avverse. Le lenti a uso prolungato dovrebbero essere tolte regolarmente, per la loro pulizia e disinfezione, oppure per essere sostituite regolarmente secondo istruzioni del Contattologo. Studi clinici hanno dimostrato una maggiore incidenza di serie reazioni avverse fra gli utilizzatori di lenti ad uso continuo rispetto a quelli che le portano ad uso giornaliero. È inoltre dimostrato che il rischio di serie reazioni avverse aumenta quanto maggiore è il tempo di utilizzo continuo delle lenti senza che avvenga la loro pulizia, disinfezione o sostituzione. L'incidenza di tali reazioni è maggiore fra i fumatori. Se avvertite fastidio agli occhi, lacrimazione eccessiva, problemi di vista o rossore agli occhi, rimuovete

immediatamente le lenti e rivolgetevi subito al Medico Oculista: chi utilizza lenti a contatto dovrebbe sottoporsi a un controllo oculare almeno due volte all'anno o con maggiore frequenza se prescritto. Ogni volta che conservate le lenti nel portalenti dovrete riempirlo con soluzione fresca senza abbacare e riutilizzare la soluzione rimasta. La soluzione già utilizzata va gettata via immediatamente dopo aver rimosso le lenti dal portalenti per la loro applicazione. Non dovete esporre né conservare le lenti o risciacquare i portalenti con altri tipi di acqua, come ad esempio acqua potabile o minerale in bottiglia o distillata o con qualunque altro tipo di soluzione non sterile. Ogni volta che rimuovete le lenti dal portalenti, dopo aver gettato la soluzione rimasta, pulite, risciacquate e il beccuccio aperto ad asciugare all'aria. Per eliminare la soluzione eventualmente rimasta, potete tenere il portalenti capovolto mentre asciuga. Sostituite il vostro portalenti frequentemente, a seconda delle vostre abitudini igieniche. **Non gettare la soluzione dal portalenti dopo ogni uso o utilizzare l'acqua per la manutenzione delle lenti può portare a contaminazione delle stesse, con il risultato di lesioni oculari e potenziale perdita della vista.**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere le istruzioni qui di seguito.

Informazioni importanti per la sicurezza:

- Seguire sempre le istruzioni per l'uso del prodotto.
- Sottoporsi a visite regolari dal proprio Medico Oculista.
- Prima di toccare le lenti, lavarsi e asciugarsi sempre le mani.
- Con le lenti e il portalenti non usare mai acqua del rubinetto, minerale in bottiglia, o salina.
- Per pulire e disinfettare le lenti utilizzare solo soluzione fresca.
- Dopo ogni ciclo di disinfezione, gettare sempre tutta la soluzione rimasta nel portalenti.
- Soluzioni saline e lacrime artificiali non disinfettano le lenti.
- Sostituire sempre soluzioni, lenti e portalenti come indicato.
- Per evitare contaminazioni, il beccuccio del flacone non deve venire in contatto con niente. Dopo l'uso, richiudere il flacone.
- Da non usare con la disinfezione termica (a caldo).

Precauzioni:

- Gettare sempre la soluzione dal portalenti dopo ogni uso.
- Tenere il flacone ben chiuso quando non viene utilizzato.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Utilizzare prima della data di scadenza stampata su confezione e flacone.
- Gettare l'eventuale soluzione rimasta 90 giorni dopo la prima apertura del flacone.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Risazioni avverse (problemi e soluzioni): Si potrebbero presentare i seguenti problemi: dolore agli occhi, bruciore o prurito (irritazione), le lenti sono meno confortevoli rispetto alla prima volta che sono state applicate, sensazione di corpo estraneo/irritato nell'occhio, lacrimazione eccessiva, secrezioni insolite, rossore oculare, visione meno brillante (scarsa acuità visiva), visione appannata, aloni colorati intorno agli oggetti, ipersensibilità alla luce (fotofobia) o occhio secco. **In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi rimuovere immediatamente le lenti.**

- Se il fastidio o il problema scompare, esaminare attentamente la lente.
- Se la lente appare in qualche modo danneggiata, evitare di applicarla di nuovo. Riporre la lente nel portalenti e rivolgersi al proprio Contattologo.
- Se la lente è sporca o si nota la presenza di una ciglia o di un altro corpo estraneo, e se il problema scompare e la lente non sembra essere danneggiata, pulirla accuratamente, risciacquare e disinfettare prima di applicarla nuovamente.
- Se il problema persiste, rimuovere subito la lente e rivolgersi al proprio Contattologo.

Se si presenta uno dei sintomi sopra citati, questi possono essere segnali di una seria condizione, come ad esempio un'infezione, un'ulcera corneale, una neovascolarizzazione o un'infite. Rivolgersi immediatamente a un Medico Oculista per identificare il problema e ricevere le cure necessarie per evitare danni oculari gravi.

Igiene ottimale per la cura delle lenti:

- Prima di toccare le lenti, lavarsi e asciugarsi sempre le mani.
- Pulire, risciacquare e disinfettare le lenti ogni volta che vengono rimosse dagli occhi.
- Applicare le lenti sempre nello stesso ordine (prima la sinistra o viceversa) per evitare di confonderle.
- Dopo l'uso, svuotare sempre e risciacquare il portalenti con la soluzione unica Biotrue® e lasciare asciugare all'aria.

Formati disponibili: La soluzione unica Biotrue® è disponibile per l'acquisto in flaconi di plastica sterili da 20ml, 300 ml, 360 ml. I flaconi e le confezioni sono contrassegnati con un numero di lotto e la data di scadenza.

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. © Bausch & Lomb Incorporated. Made in Italy.

Bausch & Lomb Incorporated,
4401 N. Goodman St.
Rochester NY 14650 USA
[CC] REP | Bausch & Lomb Incorporated, 106 London Road,
Kingston-Upon-Thames KT2 6JZ, UK



R1005069
P061011